


Patient	
Name:	Datum:
Intensität:	Offset:
Frequenztyp:	Programmname:
Ansprechpartner:	



1. Therapievorbereitung

- Reiben Sie die Hautstellen, auf der Sie die Elektroden auflegen möchten, mit warmem Wasser ab und trocknen Sie diese mit einem Handtuch.
- Bei starker Behaarung kann es nötig sein, die Haut zu rasieren.
- Setzen Sie sich bequem hin und achten Sie darauf, dass sich das zu behandelnde Bein in einer entspannten Position befindet.
- Achten Sie außerdem darauf, dass sich das Sprunggelenk vor dem Kniegelenk befindet.
- Verbinden Sie die Elektrodenkabel mit den Elektroden. Kleben Sie die Elektroden, wie auf dem Foto gezeigt, auf die Haut auf.

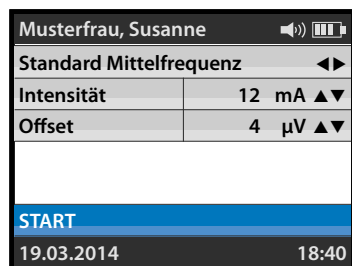

2. Therapiestart

- Schalten Sie das Gerät mit an.
- Bestätigen Sie mit **OK**. Die Therapie startet nun mit den voreingestellten Parametern.
- Üben Sie mindestens einmal am Tag zwischen 7 – 12 Minuten.
- Sollten Sie die Therapie als unangenehm oder als zu schwach empfinden, unterbrechen Sie das Programm mit einer beliebigen Taste. Korrigieren Sie dann die Intensität mit den Tasten und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.

Hinweis: Das blau hinterlegte Feld gibt an, an welcher Stelle im Menü Sie sich gerade befinden.

Wenn Sie die Parameter entscheidend verändern möchten, halten Sie bitte vorher Rücksprache mit Ihrem behandelnden Therapeuten oder Arzt.

3. Therapieabbruch und Therapieende

- Die Therapie kann jederzeit durch das Drücken einer beliebigen Taste beendet werden.
- Bestätigen Sie anschließend den Displayhinweis mit **OK**.
- Sollte die maximale Therapiezeit von 30 Minuten erreicht sein, wird die Therapie automatisch beendet.
- Schalten Sie das Gerät mit aus.

4. Elektrodenaufbewahrung

- Entfernen Sie die Elektroden und kleben Sie diese wieder auf die Trägerfolie auf.
- Bewahren Sie die Elektroden bis zur nächsten Therapiesitzung in der Schutzfolie bei Ihrem Gerät auf.
- Bitte beachten Sie außerdem die allgemeinen Hinweise zum Umgang mit den Elektroden. Diese finden Sie auf der Elektroden-Verpackung.

